



e. Urządzenie wyłącza się automatycznie jeżeli przez 10 sekund w urządzeniu nie umieszczono palca.

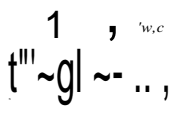

Rys.6

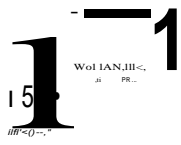

Rys. 7



Rys.8



Rys.9

Funkcja Bluetooth

TDzic::ki dostępnej w tym modelu funkcji Bluetooth, dane pomiarowe można przesyłać na smartfon. Korzystanie z oprogramowania komunikacyjnego Bluetooth opisane jest w Instrukcji obsługi aplikacji.

Montaż smyczy

1. Przeciagnąć cieńszy koniec smyczy przez otwór (rys. 10 - otwór znajduje się po obu stronach).
2. Przeciagnąć grubszy koniec smyczy przez wcześniej przecignięty fragment smyczy, mocno zaciskając.



Rys. 10

otwór

Czyszczenie i dezynfekcja

- Nie wolno namaczać lub zanurzać pulsoksymetru w cieczach.
- Wyrób należy dezynfekować tylko w razie konieczności, aby uniknąć uszkodzenia wyrobu.
- Nie wolno dezynfekować urządzenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze.
- Przed czyszczeniem i dezynfekcją należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć baterie.

CZYSZCZENIE

1. Wyrób należy czyścić miękką, wilgotną szmatką.
2. Nadmiar wody należy wytrzeć szmatką.
3. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

DEZYNFEKCJA

1. Zalecane środki dezynfekujące obejmują: etanol 70%, izopropanol 70%, aldehyd glutarowy (2%) w roztworze.
2. Wyrób należy dezynfekować za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej w jednym z powyższych środków,
3. Należy wytrzeć pozostałości po środku dezynfekującym za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej wodą.
4. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zawartość zestawu

konfiguracja standardowa	
Pulsoksymetr	1 szt.
Smycz	1 szt.
Instrukcja	1 kpl

Dane techniczne 1.

Wyświetlacz: LCD

2. Pomiar SpO2:

Zakres pomiaru: 35-100%

Dokładność pomiaru: ±2%(80%-100%) ; ±3%(70%-79%)

3. Pomiar pulsu:

Zakres pomiaru: 25-250bpm

Dokładność pomiaru: ±2bpm

4. Specyfikacja elektryczna:

Napięcie: D.C.2,2 V-,3AV

Rodzaj baterii: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V.

Zużycie energii: < 50mA

5. Specyfikacja produktu:

Wymiary: 58x34x30mm Waga:

50g(wliczając baterie)

6. Warunki pracy:

Temperatura:

Pomiar: +5 C - +40 C

Transport i przechowywanie: -10°C ... +50°C

Wilgotność:

Pomiar: 15%-80%

Transport i przechowywanie: 10% -90%

Ciśnienie atmosferyczne:

Pomiar: 860hPa-1060hPa

Transport i przechowywanie: 700hPa-1060hPa

Rozwiływanie problemów

Proble m	Prawdopodobna przyczyna	Rozwleżante
Nic wyświetla się 1. Urządzenie nie zostało wartośc SpO2 lub wartość pulsu. Wartości znikły	1. Urządzenie nie zostało prawidłowo założone na palec. 2. Wartość SpO2 jest zbyt niska. 3. Sprawdzić potężnienie aby mogła zostać zmierzona. 3. Sygnał Bluetooth jest zakłócony	1. Poprawić ułożenie palca i spróbować ponownie. 2. Spróbować ponownie. 3. Bluetooth i położyć ponownie.
Odczyt SpO2 i pulsu jest niestabilny.	1. Urządzenie mogło zostać założone zbyt płytko na palcu 2. Palce drżący lub pacjent jest w ruchu,	1. Poprawić ułożenie palca i spróbować ponownie. 2. Spróbować się nie ruszać.
Nie można uzyskać danych.	1. Baterie mogą być słabe lub wyczerpane. 2. Antena może być zamknięta nieprawidłowo. 3. Urządzenie może być uszkodzone.	1. Wymienić baterie. 2. Ponownie włożyć baterie. 3. Należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Wyświetlacz naglesit; wyświetla	1. Urządzenie wyłączyć automatycznie, gdy przez ponad 10 sekund nie wykrywa sygnału. 2. Poziom naładowania baterii 7,acznyna być niewystarczająca.	1. Przewidziane działanie. 2. Wymienić baterie.

Znaczenie symboli

Symbol	Mcaning
~	Należy postępować zgodnie z instrukcją
[I]	Zabezpieczenia typu B
~	Produkt nie zawiera alarmu
)t	Urządzenie należy zutylizować w osobnych punktach zbiórki w celu odzyskania i recyklingu.
CE	Znak CE
	Wytwórca
~	Data produkcji.
~	Numer seryjny
JLOTJ	Numer partii.
JREFJ	Numer referencyjny.
EC JREPJ	Autoryzowany przedstawiciel
IP22	Ochrona przed wnikaniem wody zgodnie z IEC 60529

GWARANCJA

Zakupiony produkt objęty jest 2-letnią gwarancją. Chętnie semy jednocześnie zwrócić uwagę; Ze do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

MJ Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd.

Unit 104, 1st Floor, 7th Building, No.1188 Lianhang Road, Minhang District, Shanghai, China 201112

TEL: +86-21-5853 1958

FAX: +86-21-5853 0420

www.berry-med.com

EC | REPJ Prolinx GmbH

Brehmstrasse 56

40239, Duesseldorf, Germany